

## ENTRETIEN | DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

FAUTEUILS TOUTES MARQUES • AVEC CRACHOIR

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

Le bon fonctionnement et la pérennité d'un équipement dépend de l'entretien du système d'aspiration & du récupérateur d'amalgame : désinfection quotidienne & nettoyage hebdomadaire

#### DÉSINFECTION

Protocole à appliquer  
**AU MINIMUM 2 FOIS/JOUR**

**Orotol Plus®**  
Dürr Dental

- Remplissez l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses de l'OroCup® et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)
- Remplissez à nouveau l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; ajoutez **2 bouchons doseur d'Orotol Plus®** et agitez le mélange (cf 3 & 4)
- Placez l'OroCup® à la verticale ; fixez les tuyaux sur les buses de l'OroCup® et aspirez 1L de solution (cf 5)
- Déversez la solution restante (1L) dans votre crachoir
- Laissez agir **1 heure au minimum ou toute la nuit** lorsque vous effectuez l'opération en fin de journée
- Après le temps de pause, ou le matin suivant, remplissez l'OroCup® **d'eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontal et aspirez toute la quantité d'eau

#### NETTOYAGE

Protocole à appliquer  
**1 À 2 FOIS/SEMAINE\***

**MD555®**  
Dürr Dental

Le MD555 Cleaner® est un produit très puissant qui agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

- Remplissez l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses de l'OroCup® et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)
- Remplissez à nouveau l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; ajoutez **8 bouchons doseurs de MD555 Cleaner®** et agitez le mélange (cf 3 & 4)
- Placez l'OroCup® à la verticale ; fixer les tuyaux sur les buses de l'OroCup® et aspirez 1L de solution (cf 5)
- Déversez la solution restante (1L) dans votre crachoir (cf 6)
- Laissez agir **1 à 2 heures maximum**
- Après le temps de pause, remplissez l'OroCup® **d'eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)

\*2 fois/semaine : si l'activité est soutenue ou utilisation de produits avec chlorhexidine ou poudres pour aéropulviseur



**OROTOL PLUS**  
Bouteille 5L



**MD555 CLEANER**  
Bouteille 5L



**OROCUP**  
Bouteille 5L



## ENTRETIEN | DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

FAUTEUILS TOUTES MARQUES • SANS CRACHOIR

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

Le bon fonctionnement et la pérennité d'un équipement dépend de l'entretien du système d'aspiration & du récupérateur d'amalgame : désinfection quotidienne & nettoyage hebdomadaire

#### DÉSINFECTION

Protocole à appliquer  
**AU MINIMUM 2 FOIS/JOUR**

**Orotol Plus®**  
Dürr Dental

- Remplissez l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses de l'OroCup® et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)
- Remplissez à nouveau l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 1L ; ajoutez **1 bouchon doseurs d'Orotol Plus®** et agitez le mélange (cf 3 & 4)
- Placez l'OroCup® à la verticale ; fixez les tuyaux sur les buses de l'OroCup® et aspirez la totalité de la solution (cf 5)
- Laissez agir **1 heure au minimum ou toute la nuit** lorsque vous effectuez l'opération en fin de journée
- Après le temps de pause, ou le matin suivant, remplissez l'OroCup® **d'eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)
- En l'absence de crachoir, il est indispensable **d'aspirer de l'eau régulièrement** (entre chaque patient idéalement)

#### NETTOYAGE

Protocole à appliquer  
**1 À 2 FOIS/SEMAINE\***

**MD555®**  
Dürr Dental

Le MD555 Cleaner® est un produit très puissant qui agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

- Remplissez l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)
- Remplissez à nouveau l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 1L ; ajoutez **4 bouchons doseurs de MD555 Cleaner®** et agitez le mélange (cf 3 & 4)
- Placez l'OroCup® à l'horizontale et aspirez la totalité de la solution ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la solution (cf 5)
- Laissez agir **1 à 2 heures maximum**
- Après le temps de pause, remplissez l'OroCup® **d'eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 1 & 2)

\*2 fois/semaine : si l'activité est soutenue ou utilisation de produits avec chlorhexidine ou poudres pour aéropulviseur



**OROTOL PLUS**  
Bouteille 5L



60,76€ TTC

**MD555 CLEANER**  
Bouteille 5L



41,81€ TTC

**OROCUP**  
Bouteille 5L



63,30€ TTC