

ENTRETIEN | DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

FAUTEUILS XO CARE • AVEC CRACHOIR

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

Le bon fonctionnement et la pérennité d'un équipement dépend de l'entretien du système d'aspiration & du récupérateur d'amalgame : désinfection quotidienne & nettoyage hebdomadaire

DÉSINFECTION

Protocole à appliquer
AU MINIMUM 2 FOIS/JOUR

**Suction Clean®
XO Care**

Votre fauteuil XO CARE est équipé d'un dispositif automatique de désinfection du système d'aspiration :

- Débranchez les tuyaux du support et désactivez l'aspiration **en appuyant 1 fois** sur le bouton situé à proximité des buses de désinfection (cf 1).
- Retirez les portes canules d'aspiration (cf 3).
- Placez les deux tuyaux sur les buses (cf 2) et réactivez l'aspiration **en appuyant 1 fois** sur le bouton (cf 1).
- La désinfection s'enclenche durant environ 6 minutes.
- Le message « **suction ok** » s'affiche sur l'écran pour indiquer la fin de la procédure.
- Les portes canules d'aspiration eux, peuvent être autoclavés à **134°C maximum** (cf 3) !
- Les filtres blancs sont à nettoyer à l'eau claire **chaque soir**, à l'aide d'une petite brosse/goupillon (cf 4).

Protocole à répéter systématiquement après une chirurgie !

NETTOYAGE

Protocole à appliquer
1 À 2 FOIS/SEMAINE*

**MD555®
Dürr Dental**

Le MD555 Cleaner® est un produit très puissant qui agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

- Remplissez l'Orocup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)
- Remplissez à nouveau l'Orocup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; **ajoutez 8 bouchons doseurs de MD555 Cleaner®** et agitez le mélange (cf 7 & 8)
- Placez l'Orocup® à la verticale ; fixer les tuyaux sur les buses et aspirez 1L de solution (cf 9) ; il vous reste alors 1L de solution : déversez la dans le crachoir (cf 10)
- Laissez agir **1 à 2 heures maximum**
- Après le temps de pause, remplissez l'Orocup® **d'eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)

*2 fois/semaine : si l'activité est soutenue ou utilisation de produits avec chlorhexidine ou poudres pour aéropulviseur



ENTRETIEN | DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

FAUTEUILS XO CARE • SANS CRACHOIR

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

Le bon fonctionnement et la pérennité d'un équipement dépend de l'entretien du système d'aspiration & du récupérateur d'amalgame : désinfection quotidienne & nettoyage hebdomadaire

DÉSINFECTION


Protocole à appliquer
AU MINIMUM 2 FOIS/JOUR

**Suction Clean®
XO Care**

Votre fauteuil XO CARE est équipé d'un dispositif automatique de désinfection du système d'aspiration :

- Débranchez les tuyaux du support et désactivez l'aspiration **en appuyant 1 fois** sur le bouton situé à proximité des buses de désinfection (cf 1).
- Retirez les portes canules d'aspiration (cf 3).
- Placez les deux tuyaux sur les buses (cf 2) et réactivez l'aspiration **en appuyant 1 fois** sur le bouton (cf 1).
- La désinfection s'enclenche durant environ 6 minutes.
- Le message « **suction ok** » s'affiche sur l'écran pour indiquer la fin de la procédure.
- Les portes canules d'aspiration eux, peuvent être autoclavés à **134°C maximum** (cf 3) !
- Les filtres blancs sont à nettoyer à l'eau claire **chaque soir**, à l'aide d'une petite brosse/goupillon (cf 4).

Protocole à répéter systématiquement après une chirurgie !

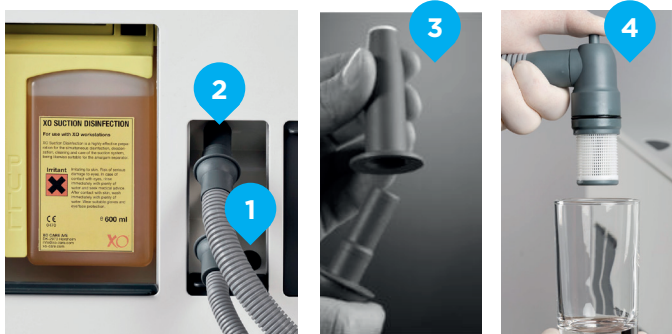

NETTOYAGE

Protocole à appliquer
1 À 2 FOIS/SEMAINE*

**MD555®
Dürr Dental**

Le MD555 Cleaner® est un produit très puissant qui agit contre les dépôts, les incrustations et les obstructions.

- Remplissez l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 2L ; placez le à l'horizontale ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)
- Remplissez à nouveau l'OroCup® **d'eau froide** jusqu'au repère de 1L ; ajoutez **4 bouchons doseurs de MD555 Cleaner®** et agitez le mélange (cf 7 & 8)
- Placez l'OroCup® à l'horizontale et aspirez la totalité de la solution ; fixez les tuyaux sur les buses et aspirez toute la solution (cf 9)
- Laissez agir **1 à 2 heures maximum**
- Après le temps de pause, remplissez l'OroCup® **d'eau tiède** jusqu'au repère de 2L, placez le à l'horizontale et aspirez toute la quantité d'eau (cf 5 & 6)

*2 fois/semaine : si l'activité est soutenue ou utilisation de produits avec chlorhexidine ou poudres pour aéropolisseur

